

Votre éponge de collagène
en post-extraction.



Hemocollagene

Éponges hémostatiques,
stériles, résorbables



Hemocollagene est une éponge hémostatique résorbable et stérile à base de collagène bovin de type 1.

Hemocollagene est indiqué pour l'hémostase dentaire locale lorsque le contrôle du saignement par ligature ou d'autres moyens conventionnels est inefficace ou impraticable⁽²⁾ : favorise l'adhésion & l'agrégation plaquettaire⁽¹⁾. Il favorise un environnement propice à la cicatrisation⁽¹⁾⁽²⁾. Les éponges de collagène sont biocompatibles et se résorbent naturellement. La forme a été conçue spécialement pour une utilisation dans les procédures dentaires.

Caractéristiques	Atouts	Avantages
Eponges conditionnées individuellement sous blister souples, pliables	Adaptation de la forme et de la taille pour permettre l'insertion dans la cavité	Peut être découpée et adaptée à la lésion
Collagène de type 1 (d'origine bovine)	Biocompatible Résorption complète dans un délai de moins d'un mois	Indiqué pour l'hémostase dentaire locale lorsque le contrôle du saignement par ligature ou d'autres moyens conventionnels est inefficace ou impraticable ⁽²⁾ : favorise l'adhésion & l'agrégation plaquettaire ⁽¹⁾ Favorise un environnement propice à la cicatrisation ⁽¹⁾⁽²⁾
Stérile	Stérilisation par irradiation aux rayons beta	Conservation & stérilité garanties jusqu'à l'ouverture par le praticien
Sans danger	Absence de substances dangereuses En conformité avec 93/42/EEC - 722/2012	Absence de transmission virale & d'encéphalopathies spongiformes transmissibles par les animaux Peut rester en contact avec les vaisseaux sanguins lésés, les gencives, les dents et les os
Implantable & résorbable	Peut être maintenu dans la lésion après l'extraction dentaire ⁽²⁾	Maintenu en place par un point en X sur la cavité

Hemocollagene peut être utilisé sur :

- les sites d'extraction
- les lésions chirurgicales parodontales
- les sites nécessitant une suture
- les ulcérations buccales (non infectées ou virales)
- les plaies traumatiques

Informations produit

Origine : - collagène d'origine bovine lyophilisée de type 1, native et non dénaturée

Caractéristiques : - souple, pliable
- 0.027 g par éponge
- biocompatible

Packaging : - boîte contenant 24 éponges (3 blisters de 8 éponges stériles conditionnées individuellement sous blister)



(1) HAS. Rapport d'Évaluation Technologique. Hémostatiques Chirurgicaux. Juin 2011.

(2) Se référer à la notice d'utilisation du produit Hemocollagene.

Dispositif médical de Classe III réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE0459 GMED. Fabricant : Septodont-France. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

Septodont - 58 Rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - France
Tél. : 01 49 76 70 02

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.septodont.fr

