

Alvéolites sèches ?



# *Alveogyl*

Pansement chirurgical  
indiqué dans le traitement  
de l'alvéolite sèche<sup>(1)</sup>



# Alveogyl est le pansement alvéolaire indiqué dans le traitement de l'alvéolite sèche qui se traduit par une douleur dentaire intense<sup>(1)(2)</sup> et facile à utiliser.

Alveogyl est un traitement en une séance s'éliminant progressivement, et ne demandant ni suture ni attention particulière hormis la surveillance du processus de cicatrisation. Il procure un effet barrière sur les tissus alvéolaires, limitant la propagation microbienne.<sup>(2)</sup> Sa texture fibreuse, grâce aux fibres de Penghawar, permet une mise en place facile et une bonne adhérence à l'alvéole.

Caractéristiques <sup>(1)</sup>	Atouts	Avantages
<b>Pansement alvéolaire dans le cas d'alvéolites sèches</b>	Effet barrière sur les tissus alvéolaires <sup>(2)</sup>	Traite l'alvéolite sèche qui se traduit par une douleur dentaire intense <sup>(1)(2)</sup> Limite la propagation microbienne par effet barrière <sup>(2)</sup>
<b>Composition à base de fibres de Penghawar</b>	Dispose d'une texture fibreuse	Bonne adhérence à l'alvéole durant l'ensemble du processus de cicatrisation
<b>Aucune suture nécessaire</b>	Ne demande pas d'attention particulière hormis la surveillance du processus de cicatrisation	Pratique et facile d'utilisation
<b>S'élimine tout seul</b>	Traitement en une séance	Ne nécessite pas de suivi particulier

## Indication

Pansement chirurgical indiqué dans le traitement de l'alvéolite sèche<sup>(1)</sup>

## Mode d'emploi

- Prélever une petite boulette de pâte (environ 0,20 g)
- Insérer dans l'alvéole dentaire préparée préalablement
- Ne pas suturer

## Présentation

Pot contenant 10 g de pâte



(1) Se référer à la notice d'utilisation du produit.

(2) Daly BJM, Sharif MO, Jones K, Worthington HV, Beattie A. Local interventions for the management of alveolar osteitis (dry socket). Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 9. Art. No.: CD006968. DOI: 10.1002/14651858.CD006968.pub3.

Dispositif médical de Classe IIa réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE0459 GMED. Fabricant : Septodont-France. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

**Septodont** - 58 Rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

[www.septodont.fr](http://www.septodont.fr)

